

Carte de procédures

Démarrage du traitement

Liberty
 united with stay•safe®
 Fresenius Medical Care

Cette carte de procédures n'est pas destinée à remplacer les conseils ou la formation de votre médecin ou de votre infirmière de DP. Veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur du cycleur Liberty® pour obtenir des informations détaillées sur la description de l'appareil, les instructions, les contre-indications, les avertissements et les précautions. Avec ces procédures comme avec toutes les autres procédures de dialyse péritonéale, observez toujours une technique aseptique. Ces informations tiennent uniquement lieu de références à consulter rapidement. Veuillez suivre les instructions telles qu'elles figurent sur les écrans du cycleur Liberty. Attendez les invites pour passer à l'étape suivante.




1

- Assurez-vous que le cycleur est branché sur une prise murale mise à la terre.
- Si vous utilisez l'IQdrive™, insérez-le dans le port USB situé sur le côté gauche du cycleur Liberty lorsque vous êtes face à celui-ci.
- Mettez en marche le cycleur Liberty à l'aide de l'interrupteur d'alimentation blanc au dos du cycleur.



2

- Pour modifier les options ou les choix de matériel, appuyez sur **Mes paramètres** pour effectuer ces modifications.
- Revenez à l'écran Prêt et assurez-vous que les informations de votre ordonnance sont correctes.
- Appuyez sur **OK** pour commencer le traitement.

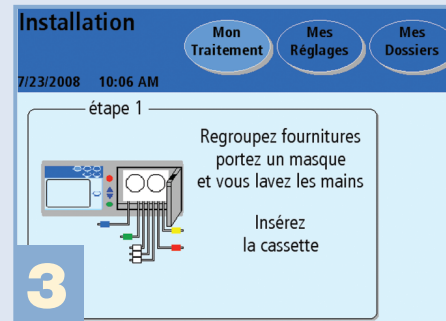

3

- Rassemblez les fournitures.
 - Poches de solution (vérifiez le S.C.A.L.E.)
 - Cassette du cycleur Liberty
 - Organisateur stay•safe®
 - Bouchons stay•safe
 - Ligne(s) de drainage ou poches de drainage
 - Désinfectant pour les mains
- Masque et lavage des mains



4

- Avant l'insertion, vérifiez que le tube et le film de la cassette ne sont pas endommagés.
- Commencez par insérer avec précaution la partie supérieure de la cassette, puis appuyez sur la partie inférieure jusqu'à ce qu'elle s'insère fermement et refermez la porte.
- Insérez le connecteur à broches (déclencheur) de la ligne bleue du patient dans l'organisateur stay•safe.
- Appuyez sur **Suivant**.



5

Lorsque vous recevez les indications suivantes :

- Raccordez la ligne **ROUGE** à la poche chauffante.
- Raccordez les lignes **BLANCHES** aux poches d'approvisionnement supplémentaires.
- Raccordez la ligne **VERTE** à la dernière option sur la poche.
- Raccordez la ligne **JAUNE** à la ligne de drainage ou aux poches de drainage.
- Assurez-vous que la poche chauffante est placée de façon uniforme sur le plateau/la balance chauffante.
- Appuyez sur **Suivant**.




6


Lorsque vous recevez les indications suivantes :

- Cassez les cônes sur les poches chauffantes et de solution avec les doigts ou à l'aide d'un outil pour casser les cônes.
- Repliez les cônes d'avant en arrière jusqu'à ce qu'ils soient entièrement séparés.
- Utilisez une pince sur les lignes non utilisées.
- Appuyez sur **Suivant**.


Démarrage du traitement (suite)

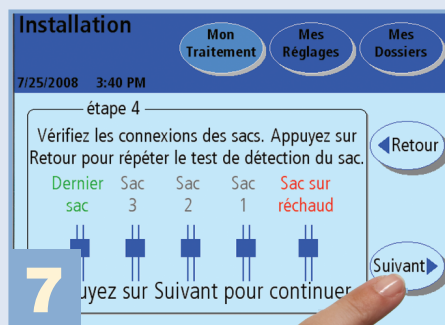


- Vérifiez que tous les raccords à la poche de solution correspondent à ceux sur l'écran.
- Appuyez sur **Suivant**.
- Le cycleur va maintenant rincer/purger les lignes avec la solution.

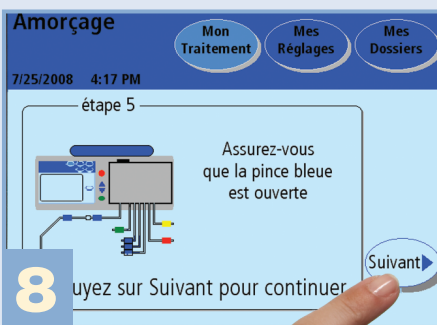


- Vérifiez que la pince de la ligne bleue du patient est ouverte
- Appuyez sur **Suivant** pour amorcer la ligne bleue du patient.

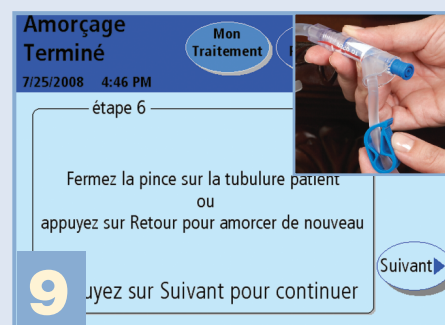


- Une fois l'amorçage terminé, examinez la ligne bleue du patient pour vous assurer qu'elle est entièrement remplie de fluide.
- Appuyez sur **Retour** pour lancer, au besoin, le réamorçage ou lorsque vous utilisez un ensemble intégré.
- Fermez la pince de la ligne bleue du patient et appuyez sur **Suivant**.

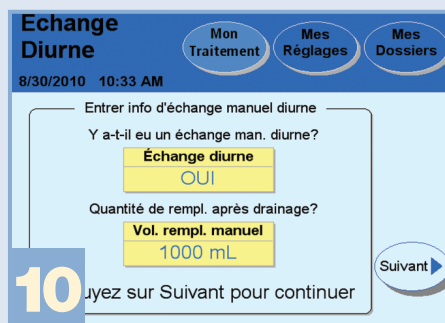

- Saisissez **OUI** si vous avez rempli votre abdomen avec une solution sans utiliser le cycleur Liberty (échange manuel).
- Saisissez le volume de remplissage de votre échange manuel. Appuyez sur **Suivant** pour continuer.
- Passez en revue les paramètres que vous venez d'entrer, puis appuyez de nouveau sur **Suivant**.

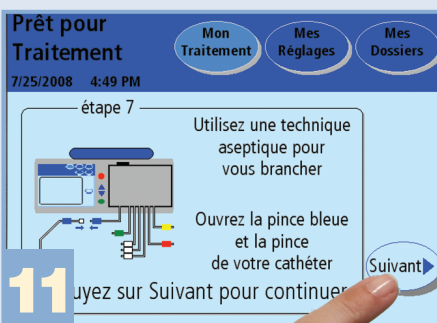

- Une fois que vous êtes raccordé(e), ouvrez les pinces du cathéter et de la ligne bleue du patient.
- Appuyez sur **Suivant** pour continuer.
- Votre traitement va maintenant commencer.

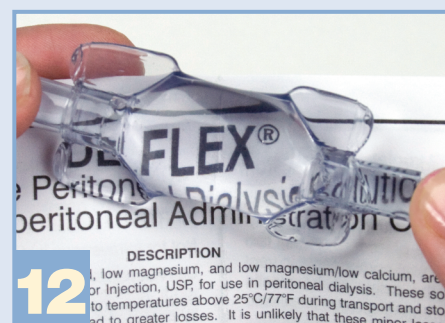

- Pendant le drainage 0, tenez la chambre de visualisation à l'envers pour permettre l'évacuation de l'air.
- Placez la chambre de visualisation devant des mots ou des chiffres comme indiqué par votre clinique pour vérifier la clarté du fluide.

Indications d'utilisation : Le cycleur Liberty de Fresenius Medical Care est destiné aux dialyses péritonéales aiguës et chroniques.

Mise en garde : Selon la loi fédérale (des États-Unis), la vente de ce dispositif n'est autorisée que sur ordonnance ou par un médecin ou tout autre professionnel de la santé. Pour une utilisation sûre et appropriée de ce dispositif, reportez-vous aux instructions d'utilisation du dispositif sur www.fmca.com.