

Guía práctica

Una Referencia del paciente para las preguntas más comunes acerca de la cicladora Liberty® Select



Liberty®
Select
united with stay-safe®

Esta información no tiene la intención de reemplazar la información o capacitación por parte de su médico o enfermera de diálisis peritoneal (PD). Consulte las Instrucciones de uso (IFU, por sus siglas en inglés) para obtener información detallada sobre la descripción del dispositivo, instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

| | |
|---|----|
| Introducción a la cicladora Liberty Select..... | 1 |
| Tratamientos basados en el tratamiento y en el ciclo..... | 2 |
| Procedimiento de configuración de la cicladora..... | 3 |
| Preguntas sobre el funcionamiento..... | 12 |
| Alarmas..... | 16 |
| Mensajes de advertencia..... | 17 |
| Diferentes personas drenan diferente..... | 18 |
| Complicaciones del drenaje..... | 19 |
| Opciones de drenaje..... | 20 |
| Sobrellenado..... | 21 |
| Interrupción del suministro eléctrico..... | 22 |
| Sobrepasar (Bypass)..... | 24 |
| Desconexión..... | 25 |
| Limpieza..... | 26 |
| Opciones de la cicladora Liberty Select..... | 27 |
| Configuraciones para la terapia de la cicladora Liberty Select..... | 30 |
| Índice..... | 33 |

Esta guía práctica está diseñada para responder muchas de las preguntas que puede tener cuando empieza a utilizar su cicladora Liberty Select en casa.

Esta información no tiene la intención de reemplazar los consejos o entrenamiento de su médico o enfermera PD. Consulte su *Guía del usuario para la cicladora Liberty Select* para obtener información detallada de descripción del dispositivo, instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. Con este y todos los demás procedimientos de diálisis peritoneal, siempre mantenga la técnica de esterilización aséptica. Esta información se brinda únicamente a modo de referencia rápida. Siga las instrucciones como aparecen en las pantallas de la cicladora Liberty Select.

Otra importante y útil referencia es la *Ficha de procedimiento: Inicio del tratamiento de Liberty Select*. Si no hemos abordado sus inquietudes o si tiene cualquier otra pregunta, siempre puede llamar a su médico o enfermera PD en su unidad de diálisis o a nuestro representante de Fresenius Medical Care, línea de Asistencia técnica al **800-227-2572**.

Este documento es para la versión de software 2.8.7 y 2.8.8 (Cicladora Liberty Select).

La cicladora Liberty Select puede programarse para proporcionar terapia basada en el tratamiento o basada en el ciclo.

BASADO EN EL TRATAMIENTO significa que su tiempo de tratamiento total se programará en su cicladora. Su cicladora proporcionará su tratamiento en el tiempo especificado. Este método es útil para personas que necesitan finalizar el tratamiento en un determinado tiempo en las mañanas para poder cumplir con otras obligaciones, como ir a trabajar.


BASADO EN EL CICLO significa que el tiempo de permanencia recetado transcurrirá antes de que la solución sea drenada automáticamente. Esto asegura que no se reduzca el tiempo recetado para filtrar los desechos y eliminar el exceso de líquidos.


NOTA: Dependiendo de los resultados de su tratamiento, su médico o enfermera PD puede cambiarle Basado en tratamiento a Basado en el ciclo o viceversa. Los pacientes pueden experimentar menos alarmas de complicación de drenaje mediante la terapia basada en el tratamiento que en la terapia basada en el ciclo. Si usted está en la terapia basada en el ciclo y sufre complicaciones de drenaje, es posible que desee discutir cambiar el tipo de terapia con su médico o enfermera PD.


¿Cómo insertar el casete?

1. Asegúrese de que la cicladora Liberty Select esté colocada cerca del frente de la mesa o carrito de modo que todos los cables cuelguen libremente del casete.
2. Verifique la etiqueta del equipo de la cicladora Liberty para asegurarse de que no haya pasado su fecha de vencimiento y luego retire la cicladora del empaque. Inspeccione la cicladora para asegurarse de que esté libre de torceduras o daños. Busque rasguños, tubos sueltos o pequeños orificios en la película del casete.


 **PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado al tocar la película del casete para evitar daños.

 **¡ADVERTENCIA!** Un casete dañado puede hacer que la solución de DP se filtre en el ciclador y es un riesgo potencial de contaminación. Notifique a su enfermera de DP si encuentra una fuga de líquido.

 **¡ADVERTENCIA!** NO UTILICE el aparato si está dañado. Deje a un lado el equipo dañado e inmediatamente llame al Servicio al Cliente al **800-323-5188** para organizar su recolección para devolver el equipo dañado.

 **PRECAUCIÓN:** NO inserte el casete hasta que la cicladora le indique las instrucciones en pantalla. Si intenta insertarlo en cualquier otro momento, el casete no encajará correctamente en su lugar y la puerta no se cerrará.


3. Empuje firmemente el pestillo de la puerta para abrir la puerta del casete.

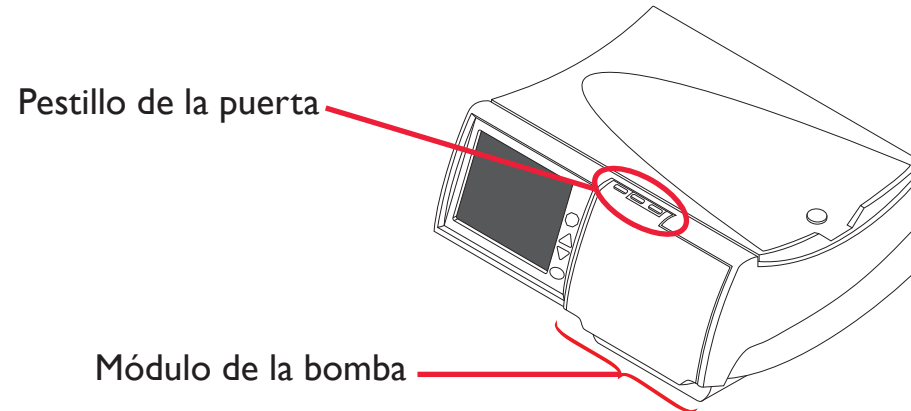

- ⊗ **PRECAUCIÓN:** Evite tocar cualquiera de los sensores dentro de la puerta del casete, ya que esto podría dañar el módulo de la bomba.
- ⊗ **PRECAUCIÓN:** La puerta del cassette está presurizada. No intente abrir la puerta del cassette hasta que su máquina lo indique.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** Verifique que el módulo de la bomba esté limpio y libre de obstrucciones antes de insertar el casete. Mantenga los dedos alejados de las partes móviles.


Procedimiento de configuración de la cicladora

4. Sostenga el casete con las cúpulas de plástico hacia afuera (hacia usted).

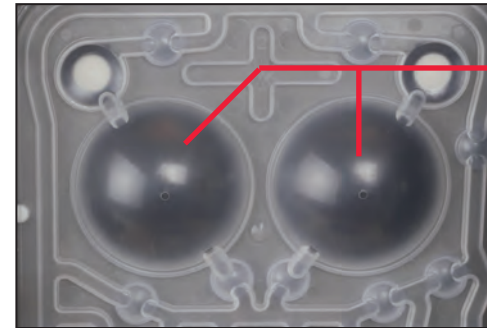

Cúpulas de casete


5. Para insertar el casete, primero deslice el casete hacia arriba y debajo de los pasadores de guía de metal en la parte superior de ambos lados del módulo de la bomba.

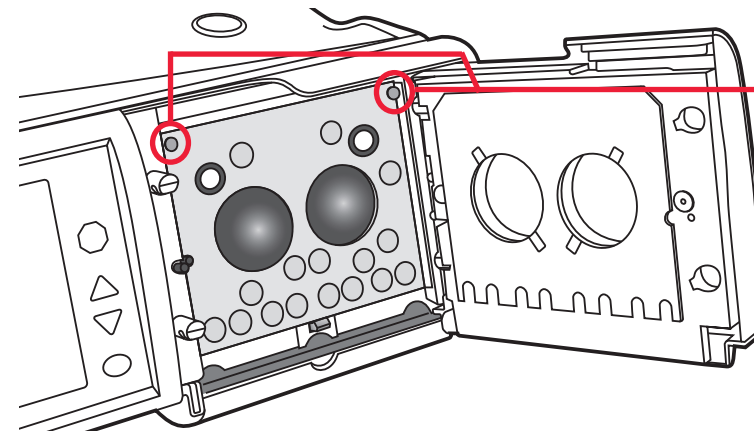

Pasadores de guía


Procedimiento de configuración de la cicladora

6. A continuación, coloque los dedos en el casete como se muestra y empuje el casete en su lugar. Asegúrese de que el casete se haya encajado en su lugar en el retén del casete en la parte inferior del módulo de la bomba.

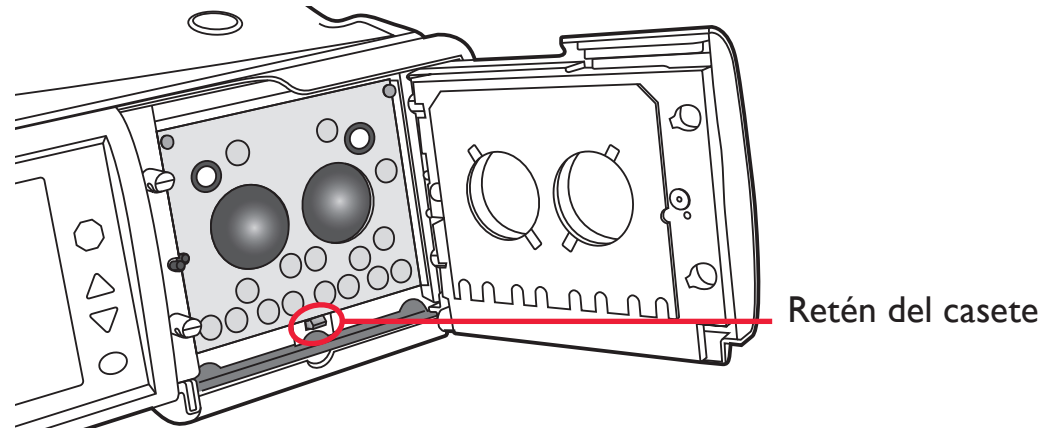

NOTA: La cicladora opera de la misma manera con o sin una barra de alineación. La misma técnica de inserción de casete debe utilizarse para las cicladoras con o sin una barra de alineación.


7. Si su cicladora tiene una barra de alineación, asegúrese de que la tubería cuelgue hacia abajo sobre la barra de alineación y al frente de la cicladora, como se muestra a la derecha.

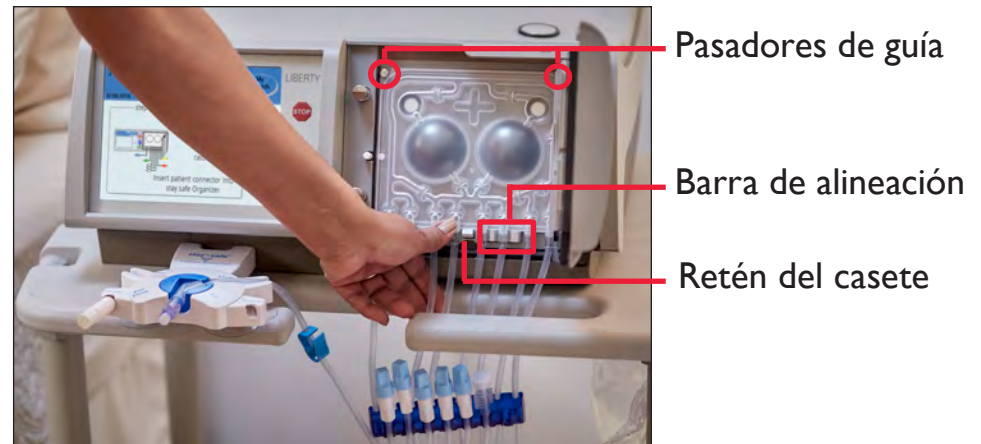

Cicladora con barra de alineación

Procedimiento de configuración de la cicladora

Si su cicladora no tiene una barra de alineación, asegúrese de que el tubo cuelgue libremente en frente de la cicladora, como se muestra a la derecha.

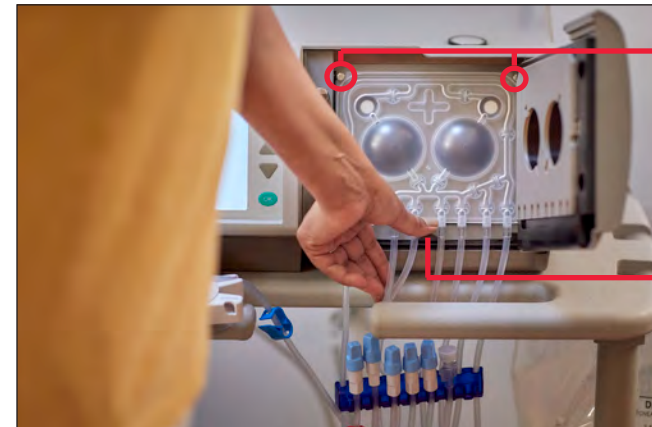


Pasadores de guía

Retén del casete

Cicladora sin barra de alineación


8. A continuación, asegúrese de que el casete se haya insertado correctamente:

- El casete debe estar debajo de ambos pasadores de guía, encajado en su lugar y apoyado en el retén del casete.
- Si usa un carrito de ciclado, asegúrese de que el tubo cuelgue libremente detrás del asa.
- Si usa una mesa de noche, asegúrese de que el tubo cuelgue libremente sobre la parte delantera de la mesa de noche.

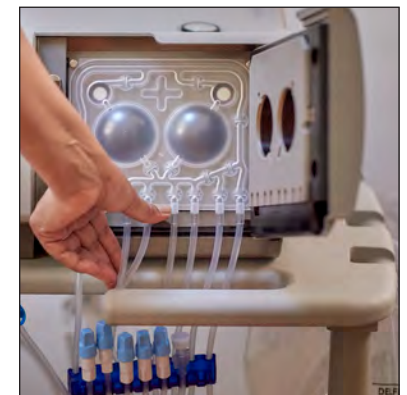

Tubos detrás de la manija del carro

9. Inserte el conector PIN stay•safe en el clip del organizador stay safe debajo del panel de control.
Consulte la página siguiente para obtener más instrucciones.

 10. Finalmente, cierre suavemente la puerta del casete. Asegúrese de que la puerta del casete encaje en su lugar para bloquearla.
-  **PRECAUCIÓN:** NO fuerce la puerta para cerrarla. Si tiene problemas para cerrar la puerta, abra la puerta del casete y asegúrese de que el casete se haya insertado correctamente.

¿Cuándo y cómo coloco el conector PIN stay•safe® en la línea del paciente (pinza azul) dentro del organizador stay•safe?

- Como se indica en la pantalla, una vez que se inserte el casete, debe colocar el conector PIN stay•safe en la presilla del organizador stay•safe debajo del panel de control insertándolo dentro del slot con la línea apuntando hacia arriba.

NOTA: Consulte la Fig. 1 que muestra el uso con más de un conector PIN stay•safe.

- Tenga cuidado de no torcer o presionar el conector PIN, lo que puede liberar prematuramente el PIN.
- Gire la tubería para que la línea esté asegurado en el canal de la tubería a la derecha.

NOTA: Si necesita limpiar su organizador stay•safe, puede lavarlo con agua tibia jabonosa o colocarlo en la parte superior de su lavaplatos.



Fig. 1

No empuje el conector PIN stay•safe hasta el final del tratamiento, a menos que se le pida que lo desconecte para una pausa.

¿Cuántas bolsas de solución se pueden colocar en la bandeja del calentador?

Para disminuir la posibilidad de contaminación, las bolsas de solución deben estar en una superficie plana con los puertos frente a usted mientras que conecta las líneas de tubería. No coloque más de dos bolsas de solución por vez en la parte superior de la bandeja del calentador durante el proceso de conexión. Asegúrese de que la bolsa del calentador es la única bolsa en la bandeja del calentador antes de ir al siguiente paso. Conecte la línea de la pinza ROJA a la bolsa del calentador, las líneas de la pinza BLANCA a las bolsas de suministro y la línea de la pinza VERDE a la última bolsa, si indicado.

Una vez conectadas, se deben retirar las bolsas de suministro de la bandeja del calentador. La bolsa del calentador con la línea de pinza roja debe entonces colocarse adecuadamente en la bandeja del calentador cubriendo el sensor de la bolsa plateado.

- Obtenga el prospecto que se incluye en cada caso de las bolsas de solución y siga las instrucciones específicas bajo «Instrucciones de uso» para iniciar el flujo de la solución.
- Asegúrese de que el cono/frangible se haya roto por completo. Una guía blanca estará visible.
- Es posible utilizar el Handi-Tool para ayudarse a romper los conos.

¿Por qué pide información la cicladora Liberty Select acerca de un intercambio manual durante el día?

Si realiza un intercambio manual utilizando un sistema de diálisis peritoneal continua ambulatoria (CAPD) además de los intercambios que realiza automáticamente la cicladora Liberty Select, deberá ingresar **SÍ** para el **interc. diurno**, y el **Vol. Infusión Manual** para este intercambio manual antes de proceder. Esto es importante porque la cicladora Liberty Select debe saber cuánto volumen de drenaje debe esperar para poder asegurar que el Drenaje 0 drene suficiente solución.

The screenshot shows the 'Intercambio Diurno' (Day Exchange) screen. At the top, there are three buttons: 'Mi Tratamiento', 'Mis Parámetros', and 'Mis Registros'. Below these, the date and time are displayed as '8/24/2016 10:42 PM'. The main area contains the following text and input fields:

- Header: 'Intercambio Diurno'
- Buttons: 'Mi Tratamiento', 'Mis Parámetros', 'Mis Registros'
- Date/Time: '8/24/2016 10:42 PM'
- Section: 'Entre información de Intercambio Manual'
- Question: 'Hizo un intercambio manual diurno?'
- Input: 'Interc. Diurno' with 'SÍ' selected
- Question: 'Cuanta infusión se hizo luego de drenar?'
- Input: 'Vol. Infusión Manual' with '1000 mL' selected
- Instruction: 'Presione "Sigue" para continuar'
- Next Button: 'Sigue ►'

¿Qué sucede si el tiempo de permanencia es menor de lo esperado?

En el modo basado en el tratamiento, su cicladora ajustará el tiempo de permanencia en base al tiempo total programado, el número de ciclos, así como el tiempo que le lleva a cada uno drenar y llenar. Si un ciclo de drenado o llenado toma más tiempo de lo estimado por su cicladora, el tiempo de permanencia se reducirá para asegurarse de que usted finalice su tratamiento a tiempo.

En el modo basado en el ciclo, su tiempo de permanencia no se reducirá.

¿Qué sucede si el volumen de la alarma es muy bajo o muy alto?

Cuando reciba su cicladora Liberty Select, el volumen de la alarma está preestablecido en cinco (5), con uno (1) como el volumen más bajo y 20 como el más alto.

Configure su cicladora en una habitación sin ruidos, así como cuando duerme. Si duerme sin audífonos, retírelos antes de ajustar el número que determina el volumen.

Para cambiar el volumen:

- Seleccione el botón **Mis Parámetros** y luego elija la pestaña Hardware.
- En esta pantalla elija la caja amarilla **Volumen alarma**. Cambiará a color anaranjado al tocarla.
- Presione las teclas de flecha **Arriba/Abajo** para cambiar las configuraciones.
- Oprima **OK (Aceptar)** para guardar sus configuraciones modificadas.

¿Cómo utilizo el IQdrive™ por primera vez o con una nueva prescripción?

Coloque el extremo de metal rectangular del IQdrive dentro de la ranura en el panel superior izquierdo de la cicladora Liberty Select. Encienda la cicladora Liberty Select. El dispositivo está diseñado para que encaje en una vía. Asegúrese de que esté bien encajado.

NOTA: Después de haber insertado correctamente el IQdrive, la pantalla debería mostrar un mensaje preguntando si desea programar la cicladora con las nuevas configuraciones del IQdrive. Si NO se muestra este mensaje, llame a su enfermera PD. Es posible que se le pida que use la pestaña de **Mis Parámetros/Opciones** y seleccione **SÍ** en **USB activado**.



Este es un ejemplo de un IQdrive (USB).
Otros modelos del IQdrive pueden cambiar.

¿Cómo utilizo el IQdrive por primera vez o con una nueva receta médica? *(continúa)*

Usted puede aceptar o rechazar las nuevas configuraciones o ver **Conf. actual** (configuraciones actuales).


Si elige ver las **configuraciones actuales** la pantalla mostrará las configuraciones del paciente en su cicladora. Desde aquí, usted tiene la opción de presionar el botón de **Conf. IQdrive** que le llevará de regreso a la pantalla anterior. Al presionar el botón **SÍ**, las configuraciones en el IQdrive sobrescribirán las de su cicladora. Al presionar el botón **NO**, se conservarán las configuraciones actuales de la cicladora y los ajustes del IQdrive se ignorarán. Si detecta un problema con su receta médica en el IQdrive, puede elegir rechazarlas. Después de seleccionar **SÍ** o **NO**, su cicladora se trasladará a la pantalla Cicladora lista y usted podrá iniciar el tratamiento.



Cuando lleve su IQdrive a su enfermera PD, consérvelo limpio y seco. Colóquelo en una bolsa plástica. No lo deje en el calor extremo de su automóvil, no lo deje en el fondo de su bolso y manténgalo alejado de imanes. Manéjelo con cuidado.

¿Qué hago cuando reciba una alarma?


Las alarmas de la barra de estado roja indican un problema que se debe reportar al servicio técnico de apoyo al 800-227-2572. Las alarmas no se pueden restablecer y requieren que usted apague su cicladora. Antes de apagar su cicladora, presione la tecla **STOP (Detener)** para silenciar su cicladora, luego escriba el mensaje de error y subcódigo. Esta información se encuentra en la parte superior de la pantalla principal debajo de la barra de estado roja. También se le pedirá el número de serie y la versión de software de su cicladora Liberty Select, que se encuentra en la parte superior de su cicladora.

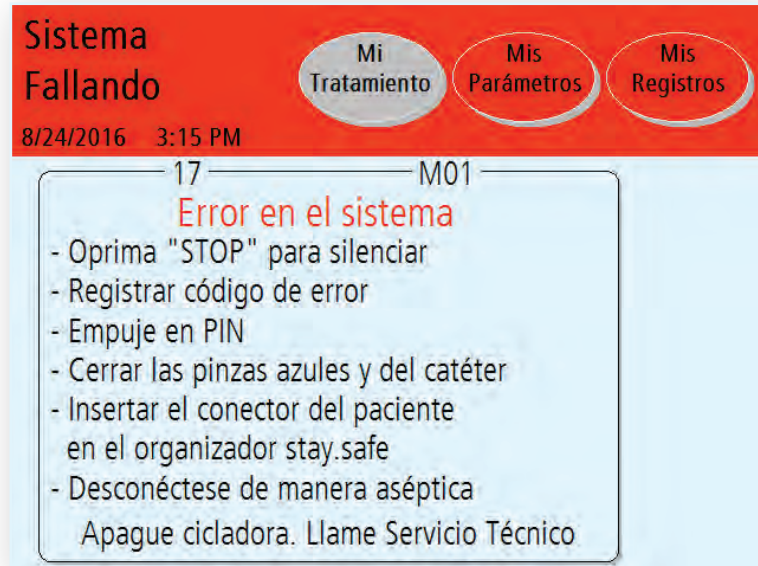

Para obtener una lista completa de alarmas, consulte la sección Advertencias y alarmas en la *Guía del usuario para la cicladora Liberty Select*.

¿Qué debo hacer cuando reciba una advertencia?


Las advertencias de la barra de estado anaranjada le alertan sobre las condiciones que requieren de su atención. Durante una advertencia, su cicladora emite una señal auditiva y la barra de estado se torna anaranjada. Presione la tecla **STOP (Detener)** para silenciar la señal auditiva. Siga las instrucciones en la pantalla para solucionar los problemas de la advertencia. La pantalla le indicará que presione **OK** para intentar de nuevo. Si no puede eliminar la advertencia después de unos cuantos intentos, llame al servicio de apoyo técnico al **800-227-2572** para obtener asistencia.

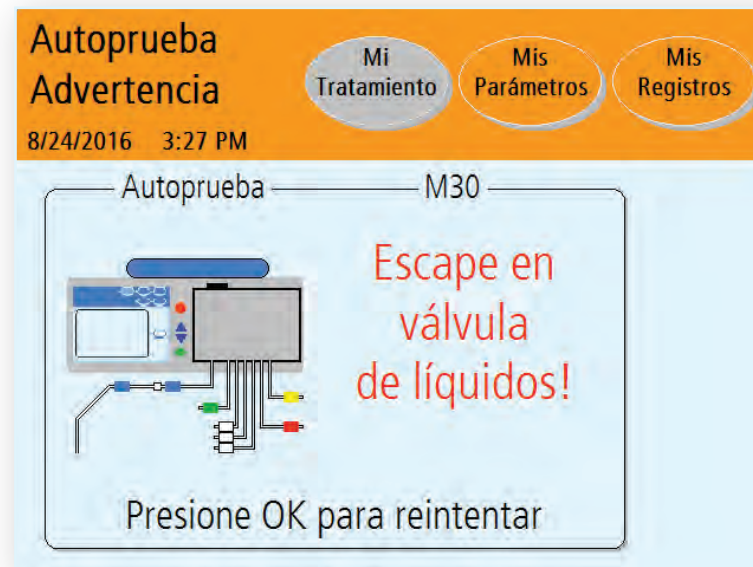

¿Cuánto tardaré en drenar?

Su catéter puede afectar el tiempo de drenado, así como su posición y varios otros factores. Si al drenaje le lleva más tiempo de lo esperado o programado, la pantalla indicará una complicación en el drenaje.

Si su cicladora está programada para proporcionar una terapia Basada en el ciclo, usted o su enfermera PD debe programar el tiempo de drenaje para que corresponda con su volumen de infusión. La siguiente gráfica le proporciona una guía general para el tiempo de drenaje con base a los volúmenes de infusión. La cicladora Liberty Select no permitirá que se programe un tiempo de drenaje que sea menor que el volumen de infusión programado dividido entre 100 ml. Por ejemplo, si su volumen de infusión es de 2500 ml, la cicladora Liberty Select no permitirá que se programe un tiempo de drenaje menor de 25 minutos. El tiempo predeterminado es de 20 minutos.

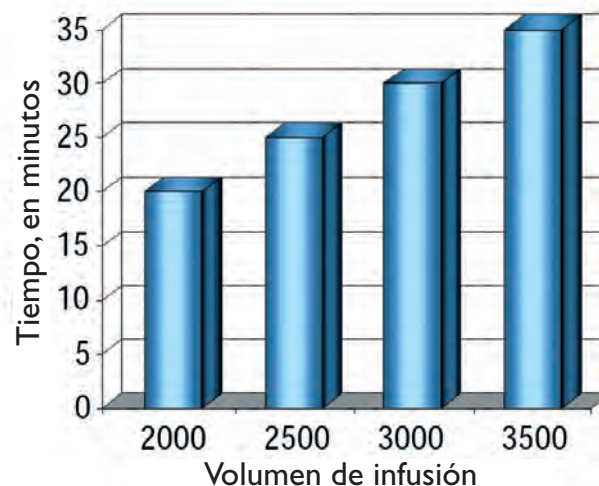

¿Qué debo hacer si tengo una complicación en el drenaje?

Si la cicladora Liberty Select muestra una advertencia por complicación en el drenaje, se sugiere lo siguiente:

- Verifique que su catéter no esté retorcido y que la pinza esté abierta.
- Verifique si hay fibrina o coágulos en la línea de drenaje. De ser así, comuníquese con su enfermera PD para obtener instrucciones.
- Cambie de posición para mover los líquidos dentro de su abdomen.
- Asegúrese de que usted no se ha rodado sobre la línea del paciente.
- ¿Está estreñido? De ser así, comuníquese con su enfermera PD para obtener instrucciones.
- Verifique que su conjunto de catéter/extensión esté asegurado adecuadamente.
- Si no puede eliminar la complicación de drenaje, comuníquese con su enfermera PD para obtener instrucciones.
- Un PIN introducido total o parcialmente puede dar lugar a una alarma de complicación de drenaje.
 - Asegúrese de que la posición de su cicladora no está a más de 12 pulgadas por encima o por debajo de la superficie de su cama.
 - Si su sueño se ve interrumpido debido a complicaciones de drenaje, hable con su médico o enfermera PD acerca de probar la terapia basada en tratamiento.

NOTA: Antes de recibir la advertencia «Complicación en el drenaje», puede escuchar unas señales auditivas con el mensaje «Línea de paciente obstruida». Este tipo de alarma se llama una «alarma suave».

¿Qué pasa si necesito drenaje adicional al finalizar el tratamiento?

La cicladora Liberty Select puede desempeñar un drenaje extra al finalizar su tratamiento si su médico o enfermera PD lo aconseja. Después de su último drenaje, si se fija la opción **drenaje adic. (drenaje adicional)** a **SÍ**, la cicladora preguntará si desea realizar un drenaje adicional.

Para fijar la opción a **SÍ**, toque el botón **Mis Parámetros** en la parte superior de cualquier pantalla de tratamiento y luego toque el botón azul de **opciones** justo por abajo. Luego, toque el botón amarillo drenaje adic. para resaltarlo. Se tornará anaranjado cuando sea activado. Finalmente, use las teclas de flecha **Arriba/Abajo** para cambiar de **NO** (configuración determinada) las configuraciones a **SÍ** y oprima la tecla **OK** para confirmar.

Si se fija la opción de **alerta drenaje adic.** a **SÍ**, su cicladora le alertará con un sonido de alarma para elegir si desea un drenaje adicional o no. Siga el mismo proceso para fijar la opción **SÍ** como lo hizo con la opción **drenaje adic.**. Si se sale de esta opción determinada a **NO**, la pantalla de la cicladora se seguirá indicando que decida si desea un drenaje adicional, pero sin un sonido de alarma.

Drenar AHORA (Drenaje inmediato) al finalizar el tratamiento: Aunque usted no haya planeado un drenaje adicional, puede todavía realizar un drenaje inmediato al finalizar el tratamiento. Un botón de **Drenar AHORA** está disponible en la pantalla de Tratamiento Completo (paso 8). Si opta por esta opción, la cicladora realizará un drenaje inmediato y lo regresará a la pantalla de Tratamiento Completo.

¿Qué es el sobrellenado y cómo lo evito?

El Volumen intraperitoneal aumentado (IIPV, por sus siglas en inglés), se conoce comúnmente como Sobrellenado, es cuando tiene demasiado líquido en su abdomen. El IIPV/Sobrellenado puede provocar serias lesiones o la muerte debido a condiciones como: hernias de la pared abdominal y/o diafragmáticas, hidrotórax, problemas cardíacos, angina de pecho e insuficiencia cardíaca, presión arterial alta, edema pulmonar, función pulmonar disminuida y efusión pericárdica.

Los pacientes y encargados de cuidados deben estar vigilantes por posibles signos de IIPV. Estos incluyen:

- Dificultad para respirar
- Sentirse lleno, hinchado o sobrellenado después del tratamiento
- Abdomen expandido o tenso
- Presión arterial elevada
- Fuga de líquidos del lugar de salida del catéter PD
- Vómitos o regurgitación
- Dolor o molestias abdominales
- Dolor en el pecho
- Cambio en el estado mental

Si experimenta alguno de estos síntomas, puede realizar un drenaje inmediato en cualquier momento durante el llenado, pausa o permanencia, o incluso al finalizar el tratamiento, si se siente incómodo o sospecha de una situación de sobrellenado. Para realizar un drenaje inmediato:

- Presione la tecla **STOP (Detener)**.
- Presione el botón **Drenar AHORA** al lado derecho de la pantalla. La siguiente pantalla muestra «Está seguro de querer Drenar AHORA?»
- Confirme que desea iniciar un drenaje inmediato al presionar **Drenar AHORA**.
- Siempre haga saber a su médico o enfermera PD que usted realizó un drenaje inmediato durante su tratamiento.

¿Qué sucede cuando hay una interrupción del suministro eléctrico?

- Todas las líneas se cerrarán automáticamente.
- La bomba se detendrá.
- La pantalla táctil quedará en blanco.

Si la interrupción del suministro eléctrico ocurre después de que usted haya iniciado su tratamiento, las configuraciones del tratamiento se almacenarán y su tratamiento volverá a comenzar en donde usted lo dejó, si la energía regresa dentro de ocho (8) horas. Se mostrará una «F» en sus registros indicando que ocurrió un corte de corriente durante dicho tratamiento.


NOTA: Su cicladora Liberty Select debe estar conectada en una toma de corriente de tres clavijas de 120V.



¡ADVERTENCIA! Si no puede insertar el enchufe en una toma de corriente, comuníquese con el servicio de apoyo técnico al **800-227-2572**. No altere el cable de alimentación eléctrica. Su máquina debe estar conectada directamente en la toma eléctrica; no use cables de extensión ni múltiples (protectores contra sobrecargas).

¿Qué sucede cuando se restablece la energía?

- Su cicladora realizará un proceso de recuperación por corte de energía, si dicho corte sucedió durante el drenaje, infusión, tiempo de permanencia o pausa.
- Se escuchará una señal auditiva. Presione **STOP (Detener)** para silenciar la advertencia.
- Su cicladora realizará una verificación de seguridad. La barra de estado indicará “Falla de energía – Recuperación” y luego se leerá en la pantalla “Se ha detectado una falla de energía - Verificando recuperación de datos...”
- Si su cicladora aprueba la verificación de seguridad, emitirá una señal auditiva de nuevo. Presione **STOP (Detener)** para silenciarlo y luego puede seleccionar **Reanudar tratamiento**.
- Si su cicladora no aprueba la verificación de seguridad, seleccione **Cancelar tratamiento** y siga los avisos en la pantalla para finalizar este tratamiento. Utilice nuevos suministros para un nuevo tratamiento.

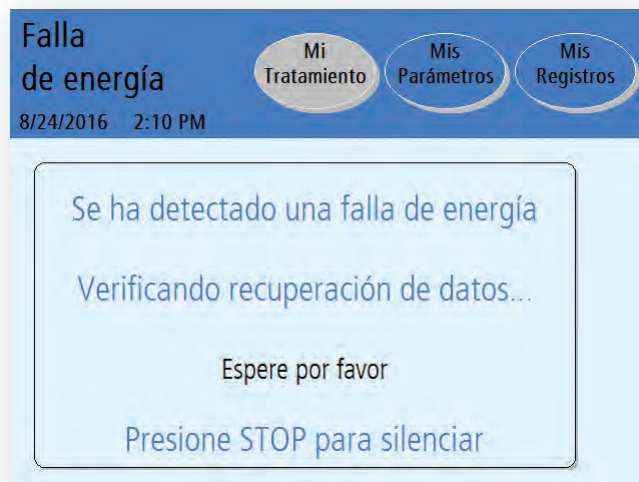

NOTA: Si la corriente eléctrica ha estado desconectada por más de ocho (8) horas, **NO** vuelva a iniciar el tratamiento. Hable con su enfermera PD acerca de alguna instrucción especial en el caso de falla en la electricidad.

¿Por qué no puedo sobrepasar durante mi tratamiento?

Si usted intenta sobrepasar cuando es peligroso hacerlo, la pantalla mostrará un mensaje que indica que “no se permite sobrepasar”. Esto no es permitido durante:

- Drenaje: si el paciente no ha drenado lo suficiente lo que puede causar un exceso de infusión después de la siguiente infusión
- Permanencia: si la bolsa del calentador no se ha rellenado con solución suficiente para la siguiente infusión
- Pausa: si la bolsa del calentador no se ha rellenado con solución suficiente para la siguiente infusión



¡ADVERTENCIA! Debe hablar con su médico o enfermera PD acerca de los riesgos asociados con el sobrepaso u omisión de alguna fase del tratamiento. El sobrepaso puede disminuir la cantidad de tratamiento que recibe. No debe omitir el Drenaje 0 a menos que tenga un día seco.




NOTA: El llenado se puede sobrepasar en cualquier momento.

¿Cómo me desconecto de mi cicladora Liberty Select?

- Póngase una máscara y lave o desinfecte sus manos, según lo indique su enfermera PD.
- Tuerza el conector azul stay•safe PIN 1/4 de giro y luego empújelo para liberar el PIN hacia el conjunto de extensión.
- Cierre la pinza de la línea del paciente (pinza azul).
- Cierre la pinza del conjunto de extensión del catéter.
- Desconecte cuidadosamente la línea del paciente de su conjunto de extensión y cierre con una nueva tapa stay•safe estéril.
- Compruebe que su conjunto de catéter/extensión esté firmemente anclado en su lugar.

¿Cómo limpio mi cicladora Liberty Select?

Mantenga su cicladora Liberty Select limpia y seca en todo momento. Limpie la superficie exterior de su máquina, según sea necesario, con un paño húmedo y una solución de lejía diluida (1:100). Después de limpiar su máquina con el paño húmedo con lejía, vuelva a limpiar con un paño húmedo con agua.

-  **PRECAUCIÓN:** No permita que se filtre líquido en su cicladora o al módulo de la bomba. Su cicladora debe estar en la posición Apagado cuando la esté limpiando para evitar que el líquido se introduzca en el módulo de la bomba. Si algo de líquido ingresa en su cicladora, debe comunicarse inmediatamente con el servicio de apoyo técnico al **800-227-2572**. Limpie inmediatamente los derrames de líquidos para evitar que la humedad pueda dañar su máquina. Su máquina debe estar colocada en una superficie tolerante al agua, y los derrames se deben limpiar inmediatamente.
-  **PRECAUCIÓN:** No toque los sensores de presión blancos en el módulo de la bomba. Presionar los sensores de presión puede dañarlos.
-  **PRECAUCIÓN:** No utilice limpiadores o desinfectantes del tipo de espuma. No utilice botellas atomizadoras. Revise periódicamente su ciclador Liberty Select en busca de:
 - Daño al gabinete
 - Piezas sueltas o faltantes

No hay ningún otro mantenimiento preventivo para su cicladora. Cualquier servicio debe ser realizado por el servicio de apoyo técnico de Fresenius Medical Care. Si su cicladora necesita servicio, llame a un representante de Asistencia técnica al **800-227-2572**.

¿Cuáles son mis ajustes opcionales en el ciclador Liberty Select?

Los siguientes ajustes están programados bajo la pestaña Opciones en la pantalla Mis Parámetros.

- **UF diurna?** – Su enfermera PD le indicará si debe o no debe seleccionar **SÍ** para esta opción. Presionar **SÍ** incluye la ultrafiltración (UF) de drenaje 0 para que sea parte de la UF neta.
- **Idioma** – Elija entre inglés, español o francés.
- **Última bolsa?** – Si se selecciona esta opción, su cicladora se llenará exclusivamente desde la opción última bolsa (pinza verde) para el último llenado. Durante la última permanencia la cicladora vaciará la bolsa del calentador, la llenará a partir de la última bolsa, calentará el fluido y le proveerá esta solución específica para el último llenado. Si necesita más de 24.000 ml de volumen de llenado total y no requiere una Opción de última bolsa, esta última línea de bolsa (pinza verde) se puede usar para solución adicional.
- **salida drenaje %** – Esta opción le permite que fije un 70% o 85% como volumen mínimo requerido para completar un drenaje. La condición básica de esta opción es de 70%. Siga su prescripción y las instrucciones de su enfermera PD.
- **drenaje adic. (drenaje adicional)** – Si esta opción está seleccionada, puede realizar un drenaje adicional después de completar el último drenaje.
- **alerta drenaje adic. (alerta del drenaje adicional)** – Si esta opción está seleccionada, su cicladorale alertará con una señal auditiva de alarma para optar si desea o no realizar un drenaje adicional.

¿Cuáles son mis ajustes opcionales en la cicladora Liberty Select? *(continúa)*

- **SI Unidades** – Usted elige **SÍ** o **NO**

Si elige **SÍ**:

Peso - Kg

Glucosa en sangre - mmol/L

Temperatura en - °C

Si elige **NO**:

Peso - lb

Glucosa en sangre - mg/dL

Temperatura en - °F

- **Inf. Personal?** – Si elige **SÍ**, su cicladora mostrará — Información personal sobre su salud — al final del tratamiento. Asegúrese de incluir sus concentraciones de dextrosa.
- **USB activado?** – Si selecciona **SÍ** en esta opción, su cicladora buscará automáticamente la IQdrive cuando se encienda su cicladora. Si la IQdrive no está insertada en su cicladora, ésta mostrará un mensaje haciéndole saber que no está en su lugar. Entonces, puede insertarlo y su ciclador detectará que el USB está activo. La información de su tratamiento se guardará en la IQdrive.

¿Cuáles son mis ajustes opcionales de hardware en la cicladora Liberty Select?

Todos los siguientes ajustes bajo la pestaña Hardware de la página Mis Parámetros se deben ingresar antes de que inicie su primer tratamiento.

- **Volumen alarma** – Se puede fijar entre 1 (bajo) y 20 (alto)
- **Tono de teclas** – Se puede fijar entre 0 (apagado) y 20 (alto)
- **Formato fecha** – Se puede fijar como MM/DD/AAAA o DD/MM/AAAA
- **Fecha** – Su cicladora se entrega con la fecha ya establecida
- **Formato de hora** – Se puede fijar de 12 horas (a. m./p. m.) o de 24 horas
- **Hora** – Su cicladora se entrega con la fecha establecida para la zona horaria Estándar del Pacífico. Restablezca la hora a su zona horaria específica siguiendo las instrucciones en su Guía del usuario de la cicladora Liberty Select o en la página 26 de esta Guía práctica.
- **Blanqueo** – Esta opción, cuando está establecida en **SÍ**, hace que la pantalla táctil se vuelva oscura después de 10 minutos de inactividad. Permanece oscura hasta que usted toque la pantalla o una tecla. Si existiera una alarma, sencillamente toque la pantalla para visualizar la imagen. Si esta opción está establecida en **NO**, la pantalla permanece iluminada en el nivel de brillo que usted seleccionó.
- **Brillo** – Se puede fijar entre 1 (muy tenue) y 10 (muy brillante)

¿Cuáles son los rangos de terapia para la cicladora Liberty Select?

- **Tiempo total de terapia** – Programable hasta 47 horas y 59 minutos
- **Rango de volumen de llenado** – 500 ml a 4000 ml (los volúmenes de pausa y último llenado pueden ser 0)
- **Tiempo de permanencia** – hasta 9 horas y 59 minutos
- **Tamaños de bolsas permitidos** – 2000 ml, 3000 ml, 5000 ml o 6000 ml (la bolsa del calentador debe contener el primer volumen de llenado más 1000 ml)
- **Número de intercambios** – de uno a 99
- **Número de pausas** – usted puede tener o no pausas recetadas. Su enfermera PD le instruirá acerca del número de pausas a ingresar.
- **Volumen total máximo** – cada tratamiento puede llevar hasta 30,000 ml.
- **Tiempo de drenaje** – 20 a 59 minutos
- **Peso del paciente** – el peso seco puede fijarse entre 44 lb (20 kg) hasta 880 lb (400 kg).
- **Intercambio manual durante el día** – de 0 a 4000 ml

¿Cómo cambio la hora en mi cicladora Liberty Select?

Cuando su máquina llega de la fábrica, está pre establecida con la hora del Pacífico. Necesita reajustarla a su zona de tiempo específico.

Después de que empiece su tratamiento, no puede cambiar la hora. Por lo tanto, debe hacer el cambio antes de iniciar o esperar hasta que termine.

Para cambiar la hora:

- Toque el botón **Mis Parámetros** y seleccione la pestaña **Cicladora**.
- Toque la casilla amarilla **Formato de hora**. Se tornará anaranjada.
- Utilice las teclas de flecha **Arriba/Abajo** para fijarlo en a. m./p. m. o de 24 horas.
- Presione **OK (Aceptar)**.
- Ahora, toque la casilla amarilla **Hora**. Se tornará anaranjada.
- Utilice las teclas de flecha **Arriba/Abajo** para fijar la hora. Presione **OK (Aceptar)**. Presione de nuevo las teclas de flecha **Arriba/Abajo** para fijar los minutos. Presione **OK (Aceptar)**. Ahora la casilla se tornará amarilla lo que indica que usted ha configurado la hora.

¿Qué datos de salud personal ingreso en la cicladora Liberty Select?

- **Información personal sobre su salud** – Cuando selecciona **SÍ** bajo las opciones de sus datos personales para este ajuste, se le pedirá que llene la siguiente información:
 - Cuánto de cada tipo de solución se utilizó
 - Última tipo de bolsa (si fuese diferente)
 - Glucosa en sangre (azúcar)
 - Peso
 - Pulso
 - Presión sanguínea
 - Temperatura

A

Advertencia 17

Ajustes opcionales 27, 28

Ajustes opcionales de hardware 29

Alarma 2, 13, 16, 19, 20, 27, 29

B

Bandeja del calentador 10

Barra de alineación 6, 7

C

Cambiar la hora 31

Complicación en el drenaje 19

Conector PIN stay•safe 8, 9

D

Datos de salud personal 32

Desconexión 1, 25

I

IIPV 21

Inserción de casete 3

Intercambio manual 11

Interrupción del suministro eléctrico 22

IQdrive 14, 15, 28

L

Limpio la cicladora 26

O

Organizador stay•safe 9

R

Rangos de terapia 30

Restablece la energía 23

S

Sobrellenado 21

Sobrepasar 1, 24

T

Tiempo de drenado 18

Tiempo de permanencia 2, 12, 23

V

Volumen de la alarma 13

www.fmcna.com



Fresenius Renal Technologies, una división de Fresenius Medical Care North America • 4040 Nelson Avenue • Concord, CA 94520

**Para consultas o preguntas, comuníquese con servicio de apoyo técnico al 800-227-2572.
Para preguntas médicas o clínicas, llame a su enfermera de terapia en el hogar o enfermera de guardia.**

Lea las instrucciones de uso para utilizar estos dispositivos de manera segura y correcta. Para encontrar una descripción completa de riesgos, contraindicaciones, efectos secundarios, y precauciones, consulte el etiquetado completo en la página web www.fmcna.com.

Indicaciones para su uso: La cicladora Liberty Select tiene como propósito la diálisis peritoneal aguda y crónica. Los conectores del paciente stay•safe están destinados para usarse con una cicladora peritoneal para el drenaje e infusión de solución PD durante los intercambios de diálisis peritoneal. Los conectores del paciente stay•safe están diseñados para la diálisis peritoneal aguda y crónica.

Precaución: La ley federal (EE. UU.) limita la venta de estos dispositivos únicamente a o por orden de un médico.

© 2017, Fresenius Medical Care North America, todos los derechos reservados. Fresenius Medical Care, el logotipo del triángulo, Fresenius Renal Technologies, Liberty, Liberty Select y stay•safe, son marcas comerciales de Fresenius Medical Care Holdings, Inc. o sus empresas afiliadas. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.
P/N 480099-01 Rev C 09/2019